

Artikel	Anzahl	Art.-Nr.
<b>PulsaClean® Pulse Lavage System</b>		
Handstück, langer Aufsatz, kurzer Aufsatz	1	LD 1000
<b>PulsaClean® Zubehör</b>		
Femurkanalbürste	1	LD 1010
Kurzer Aufsatz für Knie-TEP und sonstige Debridement	1	LD 1020



# PulsaClean®

## Einweg Pulse Lavage System



### Vertrieb

**OSARTIS GmbH**  
Lagerstraße 11-15, 64807 Dieburg,  
Germany

phone +49 (0) 6071 - 929 0  
fax +49 (0) 6071 - 929 100  
e-mail info@osartis.de  
web www.osartis.de

### Hersteller

 **Guangzhou Clean Medical Products Manufacturing Corporation**  
No.9 Guangcong Road, Conghua Development District, Guangzhou,  
China P.C.: 510990

phone +86 - 20 - 87654060  
fax +86 - 20 - 87303882  
e-mail info@cleanmfg.com  
web www.cleanmfg.com

141-2500-01 / 072018



## PulsaClean®

**PulsaClean®** ist ein effektives und einfaches Einweg-Pulse-Lavage-System zur intensiven Wundreinigung von Knochen- oder Gewebedefekten.

Mit seinen zwei Aufsätzen, sowohl für Knie- als auch Hüftarthroplastien, und seiner Spül- und Absaugvorrichtung ermöglicht PulsaClean® eine optimale Behandlungsflexibilität für den Anwender ohne zusätzlichen logistischen Aufwand.

### Vorteile

- Ein System für unterschiedlichste Anwendungsgebiete mit beigefügtem kurzen und langen Aufsatz führt zu minimiertem logistischen Aufwand
- Antrieb durch zehn 1,5 V AA R6 Batterien; Gerätebetrieb mit Spannung von 12 V bei 8,5 W Geräteleistung
- Latexfreies Produkt
- Leichtes Handstück mit einem Gewicht von < 0,13 kg, da Batterien im externen Batteriepack (Nettogewicht der Einweg-Lavage < 0,8 kg)
- Einfache Hängevorrichtung für das Batteriepack
- Benutzerfreundlicher Klickmechanismus zur sicheren Befestigung der Aufsätze


- Zwei Fließgeschwindigkeiten mit > 0,9 l/min (langer Aufsatz) und > 1,0 l/min (kurzer Aufsatz)
- Intensive und gleichzeitig schonende Reinigungswirkung durch nebelartigen Spüldruck von > 15 psi
- Anwenderfreundlicher Geräuschpegel von < 75 dB(A)
- Ergonomischer Handgriff mit ca. 3 m langen integrierten Spül- und Saugschläuchen ermöglicht komfortable Handhabung für Operateur
- Hohe Patientensicherheit, da spezielle Klemmen den Rückfluss der Spüllösung verhindern

### Indikationen

- Das PulsaClean® Pulse Lavage System dient zur intensiven Wundreinigung von Knochen- oder Gewebedefekten, wie z.B. bei
- Zementierten und zementfreien TEP (Knie & Hüfte)
  - Revisionen von Endoprothesen
  - Chirurgischen Eingriffen
  - Wundversorgung



### PulsaClean® Pulse Lavage System auf einen Blick

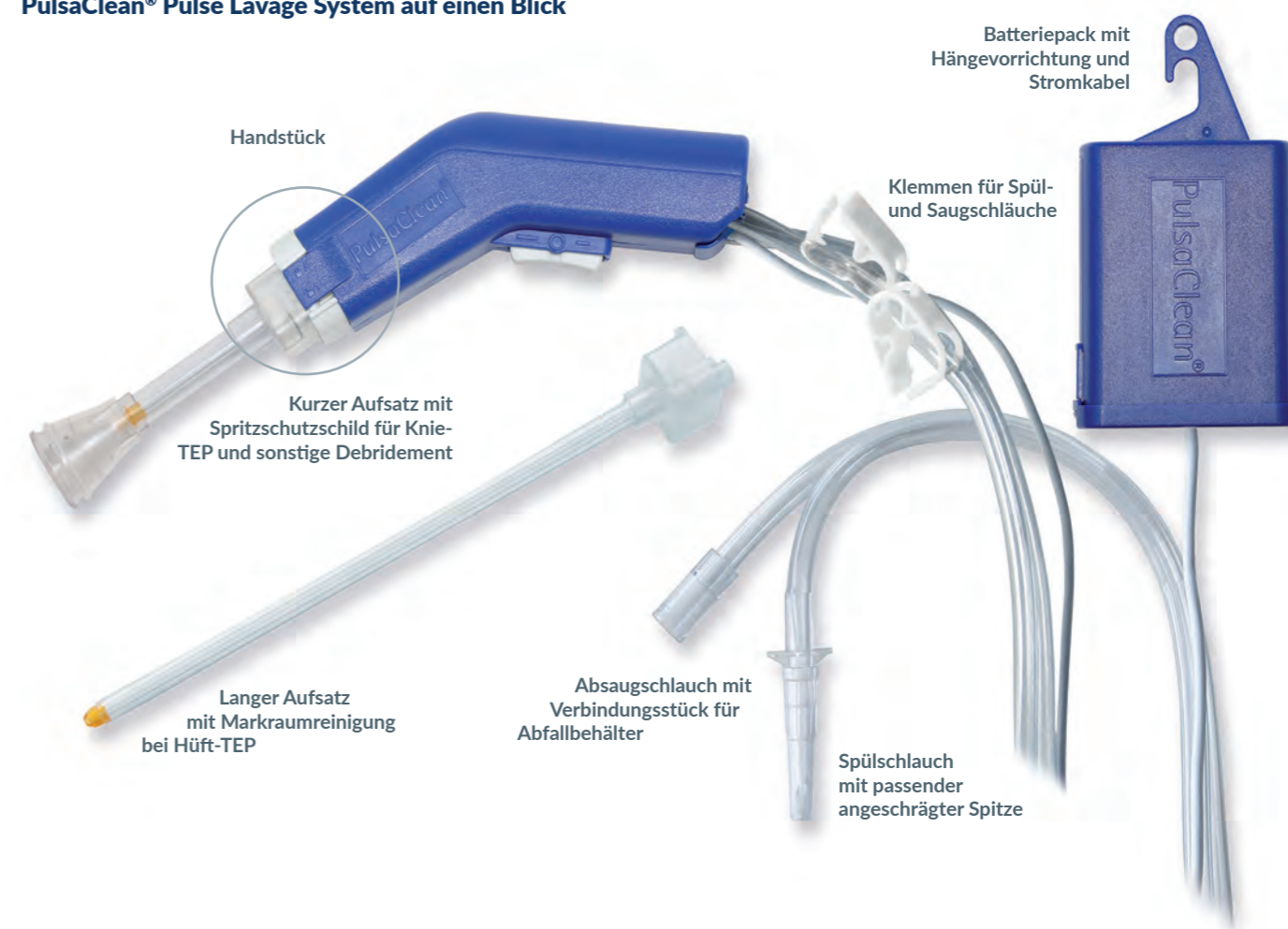

### Einfache und sichere Anwendung durch Aufsatzbefestigung mit einem »Klick«

Das PulsaClean® Handstück enthält eine spezielle Ansatzvorrichtung, welche komplementär zu den Aufsätzen ist. Die im Durchmesser unterschiedlichen Öffnungen verhindern ein falsches Aufstecken der Aufsätze, so dass die Spül- und Saugleitungen nicht verwechselt werden können.

Mittels eines Klickmechanismus können die Aufsätze fest am Handstück fixiert werden und verhindern so ein Lösen während des Gebrauches.

### PulsaClean® Femurkanalbürste

Zusätzlich zum PulsaClean® Lavage System, mit jeweils einem kurzen und einem langen Aufsatz, gibt es eine Femurkanalbürste. Die kurzen stabilen Borsten ermöglichen eine intensive Reinigung bis tief in den Markkanal. Analog zu den Spülaufsätzen bietet auch die Kanalbürste eine Spül- und Absaugfunktion.